

# FFP2 NR CTPL-0020

## Gebrauchsanweisung



1. Verpackungsfolie öffnen
2. Die offene Seite der Maske an dem Kinn anlegen und die Bänder mit beiden Händen ziehen, so dass der Nasenbügel an der Nase anliegt
3. Die elastischen Bänder an die Ohren umlegen und anpassen, bis die Maske komfortabel sitzt.
4. Nasenbügel anlegen und an die Nase drücken, bis die Maske einwandfrei sitzt.
5. Die Halbmaske nach der einmaligen Verwendung ordnungsgemäß entsorgen.

## Lagerung

Nicht benutzte Halbmaske in ihrer unversehrten Verpackung vor Sonnenlicht geschützt und trocken an einem geeigneten Ort mit einer Temperatur zwischen -20° C und +38° C aufbewahren.

## Sitz der Maske überprüfen

Kurz und schnell atmen, ohne die Maske zu verschieben. Die eingeatmete Luft sollte durch die Maske erfolgen und nicht vom Rand der Maske eingesogen werden. Fühlt es sich so an, dann muss die Position der Maske und/oder der Nasenbügel bzw. die Bänder nachgebessert werden.

CE 0598

Notified Body:SGS FIMKO OY  
Address: Takomotie 8, FI-00380 Heisinki,  
Finland(NB 0598)

## Hinweise:

Immer den Sitz der Maske und die Fehlerfreiheit der Maske überprüfen, ein Bart bzw. Schmuck können die Leistung der Maske beeinträchtigen. Bei Zweifel: benutzen Sie die Maske nicht. Tragen Sie die Maske ordnungsgemäß; wir empfehlen sie nicht bei krankhaften Atmungsstörungen zu tragen. Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheit oder Tod verursachen.

Anwendungsbereiche: an Arbeitsplätzen mit 10-fachem Arbeitsplatzgrenzwert (AWG); schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Öl Basis, mindergiftigen Stäuben, Nebel und Rauch.

**Diese Maske ist keine Sauerstoffmaske. Nur in Räumen mit ausreichendem Sauerstoff verwenden.**

Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen oder Dämpfen.

**Bitte beachten Sie die für das Einsatzland geltenden Leitwerte. Wir raten in jedem Fall von dem --Gebrauch in Räumen ab, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt.**



Vor Benutzung Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen!



Zwischen -20°C und +38°C lagern.



Unter 80% Luftfeuchtigkeit lagern.

Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen schwerfällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren.

Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.

Die filternde Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.

Nutzdauer: Nicht die Maske für mehr als 8 Stunden benutzen. Beim Wechsel: kontaminierten Bereich verlassen und Maske wechseln. Die Maske ist nicht wiederverwendbar.

Keine Maske schützt vollständig vor Gefahren!

Verfallsdatum: Jede FFP2-Maske ist ab Herstellungsdatum 2 Jahre haltbar. Das Ablaufdatum entnehmen Sie bitte der Verpackung Ihrer Einzelmaske.

Connexions Technology(Dong Guan)Ltd. ,  
No. 6, Shenbao Road, Qishi Town, Dong Guan, Guang  
Dong, China



Hier finden Sie die  
EU-Konformitätserklärung:  
[www.maskmedicare.de/Ctpl](http://www.maskmedicare.de/Ctpl)

