


# Sangofix® mit PrimeStop und Spin-Lock® Konnektor

## Hygienische und einfache Applikation von Blutprodukten

### 1 VORBEREITUNG DER BLUTTRANSFUSION



Bereiten Sie die benötigten Produkte für die Bluttransfusion vor: Sangofix®, Softa® Cloth, SwabCap®, Combi-Stopper, Omniflush® sowie einen Abfallbehälter. Schließen Sie die Rollenklemme. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Einstichdorn des Besteckes.

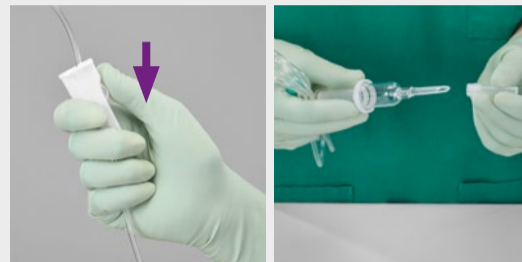

Stechen Sie den Dorn senkrecht und ohne eine Drehbewegung in den Port des Blutbeutel.\* Der weiße Ring an der Tropfkammer dient als Fingerstopper.

\* Falls notwendig, desinfizieren Sie den Port.

### 2 ENTLÜFTUNG DES TRANSFUSIONSBESTECKES



Nach Aufhängen des Beutels fixieren Sie die Leitung an der Vorrichtung der Rollenklemme. Drücken Sie das Tropfkammer-Unterteil zusammen und bringen Sie das Flüssigkeitsniveau auf Höhe des weißen Rings.



**PRIMESTOP VERHINDERT BLUTAUSSTRITT AM ENDE DER LEITUNG**


Öffnen Sie die Rollenklemme und die Leitung wird automatisch entlüftet. Schließen Sie anschließend die Rollenklemme.



**Spin-Lock® Konnektor mit bakteriendichter PrimeStop-Kappe**


- Der rotierende Spin-Lock® Konnektor verhindert das Verdrehen der Infusionsleitung.
- Die mit einer hydrophoben Membran ausgestattete Verschlusskappe ermöglicht das Entweichen der Luft und verhindert den Blutaustritt am Ende der Leitung.

### 3 KONNEKTION AN DEN PATIENTENZUGANG

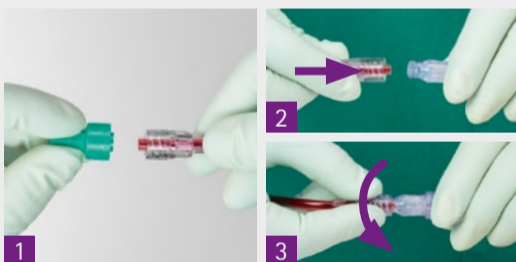


Lösen Sie die PrimeStop-Kappe und ziehen Sie das Gewinde des Spin-Lock® Konnektors bis zum Anschlag zurück. Setzen Sie den Ansatz auf das Gegenstück auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf das Gewinde.

### 4 BEGINN DER BLUTTRANSFUSION

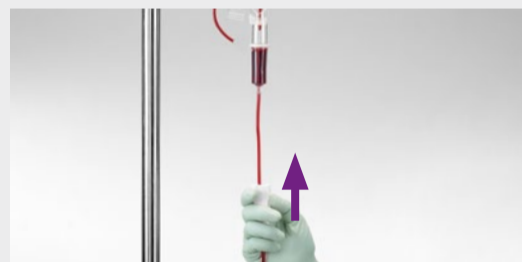


Öffnen Sie die Rollenklemme und stellen Sie die Flussrate ein. Kontrollieren Sie die Flussrate während der Transfusion. Zum Stoppen oder Unterbrechen der Transfusion schließen Sie die Rollenklemme.

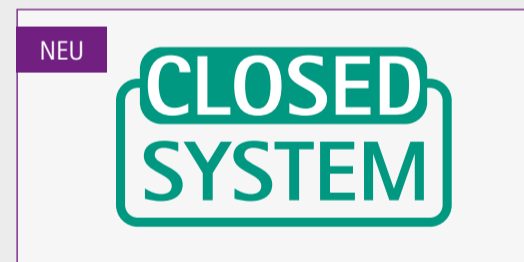

**Closed System**

Die PrimeStop-Kappe des Sangofix® verhindert den Austritt jeglicher Flüssigkeit in die angrenzende Umgebung und gilt daher als geschlossenes System gemäß der National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 2004.<sup>1</sup>

### 5 DEKONNEKTION

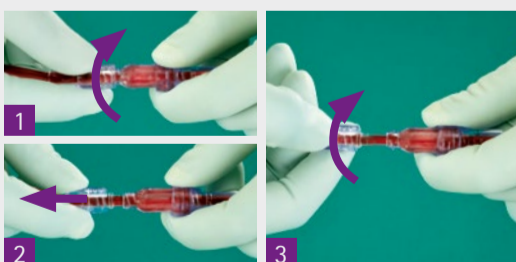

Lösen Sie die Lock-Überwurfmutter, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen **1** und bis zum Anschlag zurückziehen **2**. Drehen Sie den Ansatz der Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn und lösen Sie so das Besteck **3**.

### 6 NACH DER DEKONNEKTION



Verschließen Sie den Spin-Lock® Konnektor mit einem Combi-Stopper.



Spülen Sie den Patientenzugang mit NaCl 0,9% (z. B. Omniflush® vorbefüllt mit NaCl 0,9%). Setzen Sie die SwabCap® Desinfektionskappe aseptisch auf das ggf. vorhandene Ventil, um die Desinfektion desselben sicherzustellen.

REFERENZ | 1. Quality Labs Biomaterial testing: Test Report: Closed System test by means of Sodium Fluorescein for PrimeStop Cap of Sangofix®