

IPOS

FFP2

IPOS - Medical

Datenblatt IPOS FFP2 / Data Sheet IPOS FFP2



www.ipos-medical.de

IPOS

FFP2

EN 149:2001+A1:2009

ATEMSCHUTZMASKE FFP2

MELTBLOWN PROTECTIVE MASK
FFP2

HOHE FILTERWIRKUNG DURCH VLIESTOFF
HIGH FILTRATION EFFECT
MICROFILAMENTS SPUNBOND FABRIC

HAUTFREUNDLICHER VLIESTOFF
SKIN FRIENDLY MICROFILAMENTS
SPUNBOND FABRIC



HOCH LANGLEBIGE OBERFLÄCHE
AUS VLIESTOFF
HIGH DURABLE SURFACE SPUNBOND
NONWOVEN FABRIC

HOHE FILTERWIRKUNG DURCH
MELTBLOWN-VLIESTOFF
HIGH FILTRATION EFFECT MICROFILAMENTS
MELTBLOWN FABRIC

HOHE FILTERWIRKUNG DURCH MELTBLOWN-VLIESTOFF
HIGH FILTRATION EFFECT MICROFILAMENTS MELTBLOWN FABRIC



Klassifizierung / Classification

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III
(Für komplexe Risiken) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Personal protective equipment of category III (For complex risks) according to Regulation (EU) 2016/425.


Produktbeschreibung / Product description

- Latexfreie, hochwertige, geformte Atemschutzmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel.
Latex-free, high-quality, molded respiratory protection nose with an easily sculptable nose clip.
- Die Maske ist formstabil und auch in Kombination mit Brillen und Augenschutz tragbar.
The mask is dimensionally stable and can also be worn in combination with glasses and eye protection.
- Elastische Ohrenbänder sorgen durch gleichmäßigen Druck für Komfort im Gesicht, am Kopf und im Nacken.
Elastic earbands ensure even pressure for comfort on the face, head and neck.
- Ermöglichen ein müheloses Anlegen und die Anpassung an Gesichts- und Kopfform.
Allow effortless donning and adaptation to the shape of the face and head.
- FFP2 Masken sind ab Produktionsdatum 2 Jahre lagerfähig.
FFP2 masks can be stored for 2 years from the date of production.
- 5-lagige FFP2 Maske / 5-layer FFP2 mask
 - 1.Lage/layer = PP-Vliesstoff/PP-non-woven fabric= 25 gr/m2
 - 2.Lage/layer = PP-Vliesstoff/PP-non-woven fabric = 30 gr/m2
 - 3.Lage/layer = PP-Meltblown = 30 gr/m2
 - 4.Lage/layer = PP-Meltblown = 50 gr/m2
 - 5.Lage/layer = PP-Vliesstoff/PP-non-woven fabric = 50 gr/m2
- CE-Zertifiziert / CE certified



Anwendung / Use

- Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos.
All materials used are free from irritants and odorless.
- Für die Benutzung und Verwendung des vorgenannten Produkt machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Gebrauchshinweise und die jeweils zutreffenden Anwendungs- und Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten sind. Für nicht bestimmungsgemäßen und/oder bestimmungswidrigen Gebrauch trägt allein der Verwender die Verantwortung.
For the use and application of the aforementioned product, we expressly draw your attention to the fact that the instructions for use and the applicable application and safety regulations must be strictly observed. The user bears sole responsibility for improper and / or improper use.

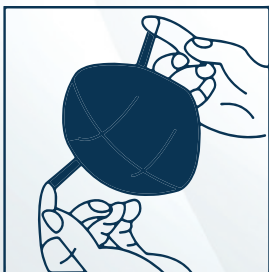

Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung, falten Sie diese auf und ziehen Sie die Bänder in beide Richtungen auseinander. Prüfen Sie die Maske optische auf Beschädigungen.

The nose clip part is facing up, the side without nose clip is facing the face, and the ear straps are pulled on each hand;



Für einen festen Sitz muss der Clip im Nasenbereich an die Gesichtskontur angepasst werden.

Place the fingers of both hands in the middle of the nose clip and press inwardly according to the shape of the nose bridge to conform to the shape of the nose bridge;



Legen Sie die Atemschutzmaske so in die Hand, dass der Nasenbereich nach oben zeigt. Führen Sie nun die Atemschutzmaske an Ihr Gesicht – zuerst Kinn einführen, danach über die Nase ziehen, Seitliche Ohr-Bänder fixieren.

Face the mask against the chin first, and pull the earband back to the ear and hang it on ear until it feels comfortable;



Prüfen der Dichtigkeit – Maske mit beiden Händen bedecken und kräftig ausatmen. Bei leichtem Druckaufbau in der Maske (Ausatmen) sollte keine Luft an den Rändern entweichen. Bei richtiger Anwendung bewegt sich das Filtermaterial beim Einatmen leicht.

Put your hands on your face when using, and check the tightness with your face.

Warnung: Haare wie Bärte können erforderlichen dichten Sitz der Maske beeinträchtigen und Leckagen verursachen.

Verpackung / Packaging

- Beschreibung: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Description: German, English, French, Italian, Spain and other languages
- im 10er Spenderbox, Einzeln verpackt / in a dispenser box of 10, separately packaged
- Palette/Pallets: 16 Karton = 17.280 FFP2 Masken/ 16 Carton = 17.280 FFP2 mask
- im 50er Spenderbox, Einzeln verpackt / in a dispenser box of 50, separately packaged
- Palette/Pallets: 16 Karton = 21.600 Masken/ 16 Carton = 21.600 mask
- Brailleschrift (Blindenschrift) / braille

Lagerung / Storage

- Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung.
Store in a dry place in the original packaging without direct sunlight, see also packaging.
- Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 2 Jahren ab Produktionsdatum.
Provided that the storage conditions are observed, the product can be stored for 2 years from the date of production.

Entsorgung / Disposal

- Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.
The product can be thermally recycled or disposed of in landfills without releasing toxic substances.
- Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.
In the case of contaminated products, the type and extent of the contamination determines the disposal; the applicable laws and regulations must be observed.

Hinweis / Note

- Vor Aufsetzen der Maske Hände waschen. Berührungen der Masken Innenseite vermeiden.
Wash hands before putting on the mask. Avoid touching the inside of the mask.



EAN Einzel Verpackt



EAN Einzel Verpackt Extra Small



IPOS ATEMSCHUTZMASKE FFP2

MELTBLOWN PROTECTIVE MASK
FFP2



EAN 10er Box - Weiß / White
4 251808 399666
FCN 10er Box - Weiß / White
FCN-1127033

CE 2841



EAN 10er Box - Schwarz / Black
4 251808 399611
FCN 10er Box - Schwarz / Black
FCN-1127034

CE 2841



EAN 10er Box - Blau / Blue
4 251808 399635
FCN 10er Box - Blau / Blue
FCN-1127035

CE 2841



EAN 10er Box - Grau / Grey
4 251808 399628
FCN 10er Box - Grau / Grey
FCN-1127032

CE 2841



EAN 10er Box - Rosa / Pink
4 251808 399690
FCN 10er Box - Rosa / Pink
FCN-1127036

CE 2841



EAN 10er Box - Farbige / Mix Color
4 251808 399650
FCN 10er Box - Farbige / Mix Color
FCN-1127037

CE 2841

VERPACKUNG / PACKAGING

PACKUNGSINHALT / BOX CONTENT:
10 Stück / Pcs

PACKUNGSMASSE / BOX DIMENSIONS:
120 mm x 49 mm x 173 mm

PACKUNGSGEWICHT / BOX WEIGHT:
0,1 kg = 100 gr

KARTONINHALT / CARTON CONTENT:
108 Box / Box = 1.080 Stück/Pcs

KARTONMASSE / CARTON DIMENSIONS:
375 mm x 600 mm x 540 mm

KARTONGEWICHT / CARTON WEIGHT:
ca. 12,3 kg

PALETTENINHALT / PALLET CONTENT::
16 Karton / Carton = 17.280 Stück/Pcs

PALETTENABMESSUNG / PALLET DIMENSIONS:
800 mm x 1200 mm x 2310 mm

PALETTEN GEWICHT / PALLET WEIGHT:
197 kg + ca. 22 kg Palette = ca. 219 kg



231 cm



60 cm

54 cm

37,5 cm

IPOS ATEMSCHUTZMASKE FFP2 EXTRA SMALL

MELTBLOWN PROTECTIVE MASK
FFP2 EXTRA SMALL



VERPACKUNG / PACKAGING

PACKUNGSINHALT / BOX CONTENT:
10 Stück / Pcs

PACKUNGSMASSE / BOX DIMENSIONS:
120 mm x 49 mm x 173 mm

PACKUNGSGEWICHT / BOX WEIGHT:
0,09 kg = 90 gr

KARTONINHALT / CARTON CONTENT:
108 Box / Box = 1.080 Stück/Pcs


KARTONMASSE / CARTON DIMENSIONS:
375 mm x 600 mm x 540 mm

KARTONGEWICHT / CARTON WEIGHT:
ca. 9,8 kg

PALETTENINHALT / PALLET CONTENT::
16 Karton / Carton = 17.280 Stück/Pcs

PALETTENABMESSUNG / PALLET DIMENSIONS:
800 mm x 1200 mm x 2310 mm

PALETTEN GEWICHT / PALLET WEIGHT:
156 kg + ca. 22 kg Palette = ca. 178 kg

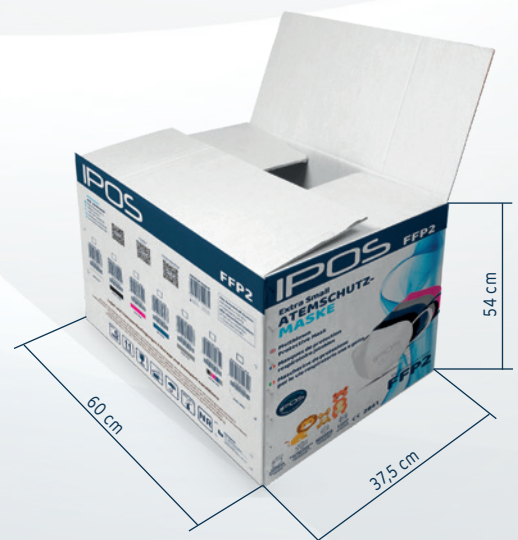

IPOS ATEMSCHUTZMASKE FFP2

MELTBLOWN PROTECTIVE MASK
FFP2



VERPACKUNG / PACKAGING

PACKUNGSINHALT / BOX CONTENT:

50 Stück / Pcs

KARTONINHALT / CARTON CONTENT

27 Box / Box = 1.350 Stück/Pcs

PALETTENINHALT / PALLET CONTENT::

16 Karton / Carton = 21.600 Stück/Pcs

PACKUNGSMASSE / BOX DIMENSIONS:

186 mm x 128 mm x 173 mm

KARTONMASSE / CARTON DIMENSIONS:

375 mm x 600 mm x 540 mm

PALETTENABMESSUNG / PALLET DIMENSIONS:

800 mm x 1200 mm x 2310mm

PACKUNGSGEWICHT / BOX WEIGHT:

0,30 kg = 309gr

KARTONGEWICHT / CARTON WEIGHT:

ca. 8,10 kg

PALETTEN GEWICHT / PALLET WEIGHT:

130 kg + ca. 22 kg Palette = ca. 152 kg



MaskMedicare

eine Marke der MaxAdventures GmbH

MaxAdventures GmbH

Am Grabenfeld 8

83379 Wonneberg

Fon +49 8681 263 99-0

Fax +49 7307 35804 20

info@maskmedicare.de

www.maskmedicare.de