

3M Science.
Applied to Life.™



Medizinische Rollenpflaster und Fixierverbände

Eine weitreichende Entscheidung in der Pflege



Expertenrat bei der Wahl des medizinischen Rollenpflasters

In der Patientenversorgung ist die Auswahl des richtigen Rollenpflasters für die jeweiligen Bedürfnisse von weitreichender Bedeutung. Im Konsensdokument „*Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science*“ empfehlen Experten deshalb die Beachtung der folgenden Faktoren bei der Auswahl eines Pflasters.¹

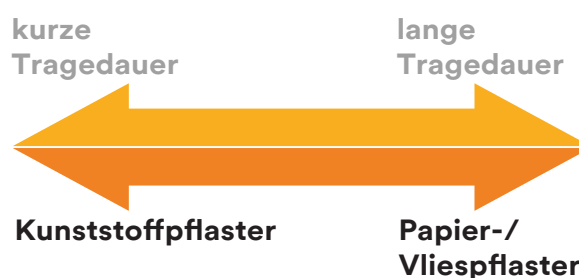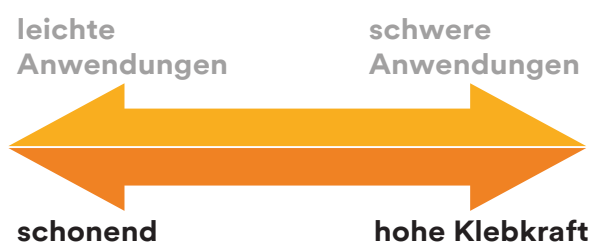

1. Der Verwendungszweck

Im Vordergrund steht, mit Rücksicht auf den Patienten, der Verwendungszweck des Produkts (z. B. die Fixierung eines schweren/leichten Zugangs oder Verbands etc.). Je nach Applikationsform muss zwischen ausreichender Haftung und Hautfreundlichkeit abgewogen werden.

2. Die geplante Tragedauer

Der Verwendungszweck steht in direktem Zusammenhang mit der Tragedauer. Einige Pflastermaterialien sind entweder für eine kurze oder lange Tragedauer geeignet, weshalb das medizinische Fachpersonal die Unterschiede zwischen Kunststoff- und Papier-/Vliespflastern berücksichtigen sollte.



3. Die anatomische Lage

Handelt es sich um Anwendungen an Stellen, an denen es zu Schwellungen oder Bewegungen kommen kann (z. B. im Bereich der Gelenke oder bei Ödemen), kann das Risiko von Hautverletzungen bereits durch ein elastisches und anschmiegsames Rollenpflaster verringert werden.

4. Die Bedingungen vor Ort

Ist der Bereich glatt oder uneben? Ist er Bewegungen bzw. Reibung ausgesetzt oder Nässe, Schweiß, Feuchtigkeit, Exsudat und/oder Körperflüssigkeiten? Einige Produkte sind speziell für diese Herausforderungen konzipiert.

Ein Muss für jede Einrichtung: Die vier Kategorien für individuelle Lösungen bei Fixierungen



Nicht klebend



Multifunktional



Elastisch



Hohe Klebkraft

Bei der Entscheidung für die richtige Fixierung ist nach Meinung der Experten der Verwendungszweck ausschlaggebend. In den meisten Einrichtungen kommen drei Anwendungsszenarien für eine Fixierung vor: die generelle Fixierung, die elastische Fixierung und die Fixierung wichtiger Zugänge/Sonden (siehe untenstehende Übersicht für Beispielanwendungen).

3M erfüllt die Ansprüche aller Anwendungen und erleichtert die Entscheidung für das richtige Produkt, passend zum Patienten und der Applikationsform: Mit den vier wichtigsten medizinischen Rollenpflastern und selbsthaftenden Stütz- und Fixierverbänden von 3M sind Sie effizient und situationsgerecht ausgerüstet.

Generelle Fixierung

- Verbände
- Immobilisation
- Zugangssicherung

Nicht klebend



3M™ Coban™ selbsthaftende Binde

- Blutentnahmen
- Infusionsleitungen
- Wundversorgung

Multifunktional



3M™ Micropore™ S Silikonrollenpflaster

Weitere multifunktionale 3M Rollenpflaster:

3M™ Micropore™ Vliespflaster
3M™ Transpore™ Kunststoffpflaster

Elastische Fixierung

- Fixierung bei zu erwarteten Schwellungen und bei beweglichen Anwendungen

Elastisch



3M™ Medipore™ Vliespflaster

Weitere elastische 3M Rollenpflaster:

3M™ Microfoam™ Schaumpflaster

Fixierung wichtiger Zugänge/Sonden

- Zentraler Venenkatheter
- Blasenkatheter
- Tubus
- Thoraxdrainage
- Magensonde
- Wunddrainage

Hohe Klebkraft



3M™ Multipore™ Dry

Weitere 3M Rollenpflaster mit hoher Klebkraft:

3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster*

* 3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster mit hoher Klebkraft soll nicht für die Fixation kritischer Zugänge wie zum Beispiel Tubusfixierung eingesetzt werden.

Multifunktional



3M™ Micropore™ S

- hautschonend ablösbares Silikonpflaster: sanfter und angenehmer zur Haut als herkömmliche Pflaster
- ideal für Patienten mit fragiler, empfindlicher oder gefährdeter Haut
- einfach und unter minimaler Ablösung von Hautzellen und Haaren entfernbar
- repositionierbar, atmungsaktiv, leicht längs und quer reißbar
- Trägermaterial: Polyestervlies
- Klebstoff: Silikonkleber ohne Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
2770S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	16015535	*	7752914	35.01.09.12.1
2770-1	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	12	16015512	*	7752912	35.01.09.12.1
2770-2	5 cm × 5 m	ohne Abroller	6	16015529	*	7752913	35.01.09.13.1

Einzelpackungen

2775NP-1	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	1	9079813	4516663	6524738	35.01.09.12.1
----------	--------------	---------------	---	---------	---------	---------	---------------

Multifunktional



3M™ Transpore™

- transparentes Kunststoffpflaster: atmungsaktiv, wasserabweisend, leicht quer und längs reißbar
- Trägermaterial: poröses Polyethylen
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
1527-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	1405360	0293657	7776253	35.01.09.01.1
1527S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	16740354	4999549	7079298	35.01.09.03.1
1527-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	1405377	0203631	7776251	35.01.09.03.1
1527-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	1405383	0475016	7776252	35.01.09.04.1

Einzelpackungen

1527NP-1SD	2,5 cm x 5 m	mit Abroller	1	00913309	2602625	1313758	35.01.09.03.1
1527NP-1S	2,5 cm x 5 m	ohne Abroller	1	12483133	0201253	1831708	35.01.09.03.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

Multifunktional



3M™ Micropore™

- hautfreundliches Vliespflaster: anschmiegsam, atmungsaktiv, kann beschriftet werden
- Trägermaterial: Viskosevlies
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen Micropore weiß

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1530-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319732	4999555	716856	35.01.09.01.1
1530S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	16740360	*	7596562	35.01.09.03.1
1530-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319749	4999561	682471	35.01.09.03.1
1530-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319755	4999578	727558	35.01.09.04.1
1535E-0	1,25 cm × 9,1 m	mit Abroller	24	*	4999756	7777945	35.01.09.01.1
1535E-1	2,5 cm × 9,1 m	mit Abroller	12	*	4999779	7777946	35.01.09.03.1
1535E-2	5 cm × 9,1 m	mit Abroller	6	*	4999785	7777947	35.01.09.04.1

Einzelpackungen

1530NP-OSD	1,25 cm × 5 m	mit Abroller	1	06337930	2602594	7776255	35.01.09.01.1
1530NP-1SD	2,5 cm × 5 m	mit Abroller	1	06337947	2602602	7776256	35.01.09.03.1
1530NP-1S	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	1	12483067	5021946	1831648	35.01.09.03.1

Bestellinformationen Micropore hautfarben

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1533-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319695	4999584	869206	35.01.09.01.1
1533-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319703	4999590	869212	35.01.09.03.1
1533-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319726	4999609	852832	35.01.09.04.1

Einzelpackungen

1533NP-1SD	2,5 cm × 5 m	mit Abroller	1	12483110	4999644	7776254	35.01.09.03.1
1533NP-1S	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	1	12483104	4999650	7776257	35.01.09.03.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

Elastisch



3M™ Medipore™

- flexibles Fixationsvlies zum Zuschneiden (mit Liner) oder zum Abreißen (perforiert): atmungsaktiv, anschmiegsam, querelastisch
- Trägermaterial: Polyestervlies
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen Medipore H perforiert

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇪🇸 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
2861	2,5 cm x 9,1 m	24	07478957	*	7622443	35.01.09.30.1
2862	5 cm x 9,1 m	12	07478963	*	4414572	35.01.09.31.1
2863	7,6 cm x 9,1 m	12	07478986	*	4414589	35.01.09.32.1
2864	10 cm x 9,1 m	12	07478992	*	4414595	35.01.09.32.1
2866	15,2 cm x 9,1 m	12	07479000	*	4414661	35.01.09.33.1
2868	20,3 cm x 9,1 m	6	07479017	*	7622466	35.01.09.34.1

Bestellinformationen Medipore mit Liner

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇪🇸 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
2991/1	5 cm x 10 m	24	*	*	5107257	35.01.09.31.1
2991/2	10 cm x 10 m	12	*	*	5107286	35.01.09.32.1
2991/3	15 cm x 10 m	12	*	*	5107263	35.01.09.33.1
2991/4	20 cm x 10 m	6	*	*	7596556	35.01.09.34.1

Einzelpackungen

2991NP-3	15 cm x 10 m	1	00225727	2367130	2859672	35.01.09.33.1
----------	--------------	---	----------	---------	---------	---------------

3M™ Microfoam™

- komfortables Schaumpflaster: elastisch und wasserabweisend
- zur Fixierung und Polsterung, auch unter dauerhafter Kompression
- Länge gedehnt 5 m
- Trägermaterial: PVC-Schaum
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇪🇸 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1528-1	2,5 cm x 2,7 m	ohne Abroller	12	02024269	*	766191	05.20.04.00.1
1528-2	5 cm x 2,7 m	ohne Abroller	6	02024275	*	766216	05.20.05.00.1
1528-3	7,5 cm x 2,7 m	ohne Abroller	4	03189274	*	766222	05.20.06.00.1
1528-4	10 cm x 2,7 m	ohne Abroller	3	03190308	*	766239	05.20.07.00.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

Hohe Klebkraft



3M™ Durapore™

- universelles Kunstseidenpflaster: hohe Klebkraft, atmungsaktiv, anschmiegsam, zugfest, längs und quer reißbar, beschriftbar
- Trägermaterial: Kunstseidenvlies
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1538-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	1593433	2366722	1638851	35.01.09.01.1
1538S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	16740377	4999791	7079306	35.01.09.03.1
1538-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	1593551	2366739	1668680	35.01.09.03.1
1538-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	1593568	2366751	1668674	35.01.09.04.1

3M™ Multipore™ Dry

- hautfreundliches Polyesterpflaster zum Zuschneiden (mit Liner): für die effektive Fixierung von Tuben und Sonden
- einfache Längenanpassung durch rückseitiges Maßband
- wasserabweisend, schnell trocknend, längs- und querelastisch
- Trägermaterial: Polyester
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
3730-0	1,25 cm x 5 m	ohne Abroller	12	12650424	4740099	1358260	35.01.09.01.1
3730-1	2,5 cm x 5 m	ohne Abroller	24	12650430	4740107	1358261	35.01.09.03.1
3730-2	5 cm x 5 m	ohne Abroller	12	12650447	4740113	1358262	35.01.09.04.1

Nicht klebend



3M™ Coban™ und 3M™ Coban™ NL

- selbsthaftender, offenporiger und elastischer Stütz- und Fixierverband aus ungewebten Polyesterfasern mit integrierten Polyester-Urethanfilamenten
- kann bis zu 7 Tagen zur Fixation am Körper verbleiben
- haftet nur auf sich selbst, nicht auf der Haut oder den Haaren
- lockert sich nicht und verrutscht nicht
- angenehmes, hautfreundliches Material
- atmungsaktiv
- leicht zu applizieren und zu entfernen
- auch in steriler Ausführung erhältlich: ideal für die Anwendung im OP
- latexfrei und latexhaltig verfügbar



Bestellinformationen Coban NL latexfrei, hautfarben

Artikel-Nr.	Breite	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
2081	2,5 cm	5	*	*	7777950	35.01.07.20.1
2082	5 cm	36	*	*	7777951	35.01.07.22.1
2083	7,5 cm	24	*	*	7777952	35.01.07.23.1
2084	10 cm	18	*	*	7777949	35.01.07.24.1
Steril						
2084S	10 cm	18	*	*	5304911	35.01.07.24.1

Bestellinformationen Coban latexhaltig

Artikel-Nr.	Breite	Farbe	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
1581	2,5 cm	hautfarben	30	*	3265673	1296942	35.01.07.20.1
1581B	2,5 cm	blau	30	*	*	1638816	35.01.07.20.1
1582	5 cm	hautfarben	36	*	*	1383291	35.01.07.22.1
1582B	5 cm	blau	36	*	*	1638822	35.01.07.22.1
1583	7,5 cm	hautfarben	24	*	*	1621276	35.01.07.23.1
1583/A	7,5 cm	Assortiert: blau, rot, grün, gelb, weiß, hautfarben – je 2 Rollen	12	*	*	7777948	35.01.07.23.1
1583B	7,5 cm	blau	24	*	2190217	1638791	35.01.07.23.1
1584	10 cm	hautfarben	18	*	*	1347823	35.01.07.24.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

¹ McNichol, L., Lund, C., Rosen, T., & Gray, M. (2013). Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science. *Journal of Wound Ostomy & Continence*, 40(4), 365-380.



3M Deutschland GmbH
Health Care
Carl-Schurz-Str. 1
41460 Neuss
Telefon +49 (0)2131 8819 260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Telefon +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstraße 91
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 90 90
Innovation.ch@mmm
www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

3M, Cavilon, Transpore, Medipore, Durapore, Micropore, Microfoam, Multipore und Coban sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M. Bitte nach Gebrauch recyceln.
© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.
EB12-0064 / 2020-0047