



NEU DER COVID-19 ANTIGEN SPUCKTEST


- **SICHER**
- **BEQUEM**
- **SCHMERZFREI**




PZN 17204563




PZN 17204586

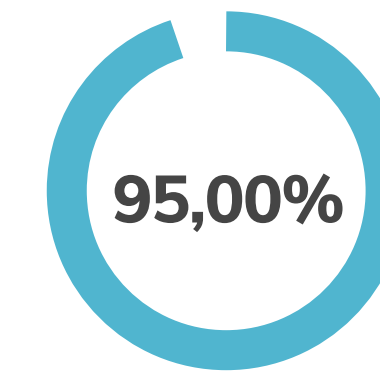

Sensitivität

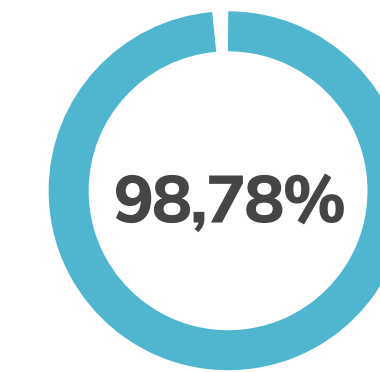

Spezifität

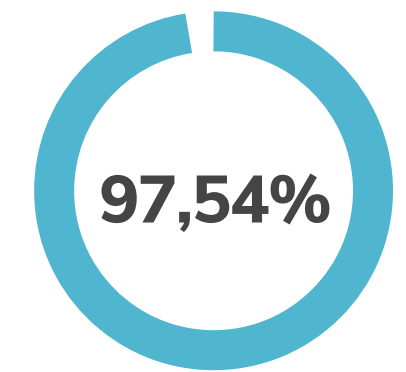

Genauigkeit

Der **EASY CHECK** von Ritter auf einen Blick:

- Zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Speichel
- Patientenfreundlich durch nicht-invasive Proben-Entnahme
- Ideal für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
- Schnelle Testergebnisse bereits ab 4 Minuten (je nach Raumtemperatur)
- Durch Produzenten BfArM-gelistet & „Pre Qualification“ bei der WHO



Bundesinstitut
für Arzneimittel
und Medizinprodukte



World Health
Organization



EASY CHECK LIEFERUMFANG

Eine Packung **EASY CHECK** enthält:

- 20 Testkassetten
- 20 Pipetten
- 20 Probenentnahmeröhrchen
- 20 Einweg-Tüten zum Auffangen von Probenmaterial (Speichel)
- Packungsbeilage

(Wie jeder Test vom Rückgaberecht ausgeschlossen)



Auszug aus der **EASY CHECK** Gebrauchsanweisung:

Der EASY CHECK COVID-19 Antigen-Schnelltest kann mit hinteren oropharyngealen Speichelproben durchgeführt werden.

Für hintere oropharyngeale Speichelproben: waschen Sie Ihre Hände mit Seife und wasser- oder alkoholbasierten Lösungen. Öffnen Sie den Behälter.

1. Räuspern Sie sich, lösen Sie den Speichel aus dem Rachen und spucken Sie ihn in den Behälter (ungefähr 2ml). Vermeiden Sie eine Kontamination an der äußeren Oberfläche des Behälters durch den Speichel. Die beste Zeit um die Probe zu sammeln ist nach dem Aufstehen, bevor der Patient die Zähne geputzt, gegessen oder getrunken hat.
2. Nehmen Sie ungefähr 200µL der Speichelprobe mit der Pipette auf.
3. Öffnen Sie das Probenröhrchen, geben die Probe hinein und schütteln Sie es um alles gut zu vermischen.
4. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel, legen Sie sie auf einen Tisch und schneiden Sie den vorstehenden Teil vom Deckel des Probenröhrchens ab. Geben Sie dann 3 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung und lesen Sie das Resultat, je nach Raumtemperatur, nach 4-15 Minuten ab.





ÜBER DEN HERSTELLER



Weltweit führender Hersteller von Lateral Flow Testkits in China. Das Unternehmen ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes chinesisches Biotechnologie-Unternehmen, das qualitativ hochwertige medizinische In-vitro-Diagnostik (IVD)-Schnelltestkits sowie revolutionäre kundenspezifische Reagenzienkits entwickelt, herstellt und in alle Teile der Welt liefert.



Das Unternehmen wurde von einem Team von Fachleuten mit langjähriger kombinierter Erfahrung in den Bereichen Technik, Marketing/Vertrieb, Betrieb und Herstellung in dieser Branche gegründet. Ihre in-vitro-diagnostischen Lateral-Flow-Kits screenen auf eine breite Palette von Targets, darunter Infektionskrankheiten, Tumore, Herzanomalien, Drogenmissbrauch und Fruchtbarkeit.

Dank des umfassenden Qualitätsmanagementsystems, welches internationale Standards (EN ISO 13485) anwendet, wird eine hohe Qualität der Testergebnisse und Genauigkeit gewährleistet. Die meisten ihrer Produkte sind CE- und CFDA-zertifiziert.